

FlexiSeal[®] PROTECT[®]

NOWOŚĆ



**W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO
PACJENTÓW I PERSONELU**

 **ConvaTec**

FlexiSeal[®] PROTECT[®]

OCHRONA PRZED PRZEPEŁNIENIEM


Jedyny system, który posiada wskaźnik poziomu wypełnienia balonika i wskazuje jego przepełnienie.

OCHRONA PACJENTA

Niebieska kieszonka na palec pozwala na łatwą i precyzyjną aplikację miękkiego, silikonowego balonika.

OCHRONA PRZED ZAPACHEM

Ulepszona ochrona przed nieprzyjemnym zapachem. Zawartość worka monitorowana w sposób dyskretny dla pacjenta*.

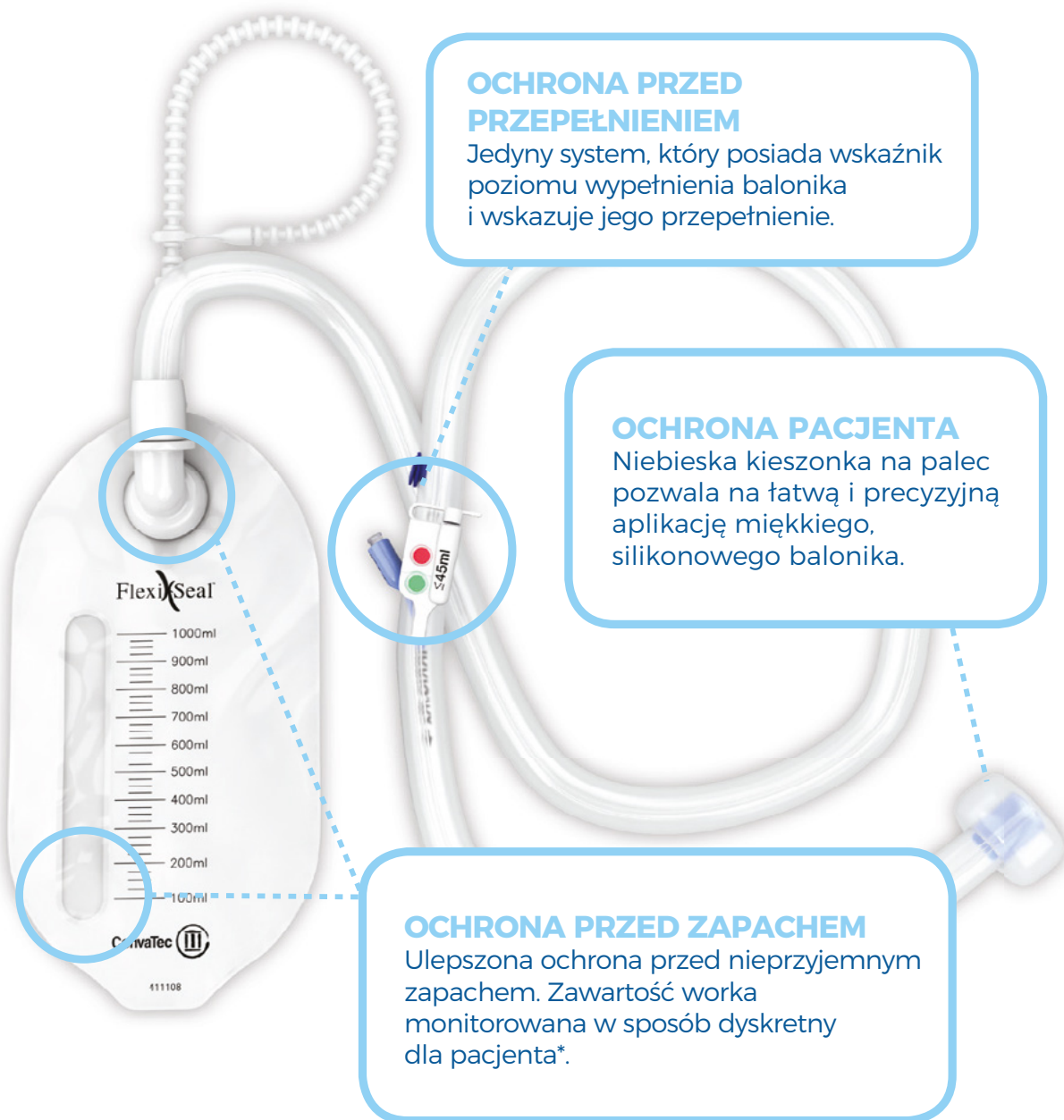

BEZKONKURENCYJNY W OCHRONIE KONTROLUJE PRZEPEŁNIENIE BALONIKA

Nowy wskaźnik wypełnienia:



Zielony sygnalizuje wypełnienie optymalne dla danego pacjenta.*



Czerwony wskazuje na przepełnienie balonika.




Biała zatyczka ochronna minimalizuje ryzyko pomylenia portów.



Używając strzykawki dołączonej do zestawu powoli wypełniaj balonik umieszczony w bańce odbytniczej pacjenta.

Zielony wskaźnik uniesie się, gdy balonik osiągnie optymalną dla pacjenta wielkość.*

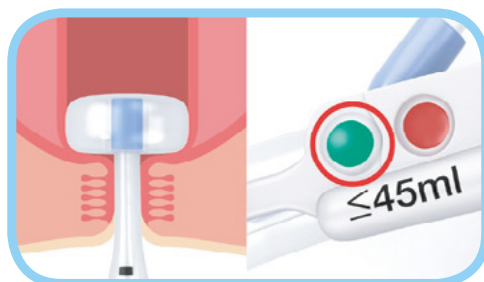

Czerwony wskaźnik uniesie się, gdy dojdzie do przepełnienia balonika. Jeżeli wskaźnik pozostaje uniesiony, całkowicie opróżnij balonik z wody.

Powtórz proces napełniania i przerwij, gdy zielony wskaźnik uniesie się, sygnalizując wypełnienie optymalne dla pacjenta.



* Maksymalny poziom wypełnienia balonika wynosi 45ml. Wypełnianie powinno zostać przerwane, gdy zielony wskaźnik uniesie się i nie opadnie. Sytuacja ta może wystąpić przed wypełnieniem balonika do 45ml, jeżeli bańka odbytnicza jest mniejsza, niż maksymalna objętość wypełnienia balonika. Nigdy nie wypełniaj balonika powyżej 45ml.

Flexi-Seal[®] PROTECT[®]

DODATKOWE KORZYŚCI:



OCHRONA PRZED ZAKAŻENIEM

Udokumentowane w badaniach in vitro powstrzymanie rozprzestrzeniania zarodników *C.difficile* do środowiska.¹



KOMPLETNA OCHRONA PRZED NIEPRZYJEMNYM ZAPACHEM

Bariera zapachu na całej długości rękawa odprowadzającego chroni przed nieprzyjemnym zapachem.



BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS POBIERANIA PRÓBEK STOLCA

Niebieski port pozwala bezpiecznie i łatwo pobierać próbki minimalizując ryzyko kontaktu z kałem.



WORKI ZBIORCZE PRIVACY™

Sześciokrotnie skuteczniej eliminują nieprzyjemny zapach w porównaniu do worków z filtrem węglowym.^{2,3,4}

KODY DO ZAMAWIANIA PRODUKTÓW

Flexi-Seal[®] PROTECT[®] zestaw (1 zestaw/opakowanie, 1 worek zbiorczy)

421630

Worki zbiorcze Privacy™ z filtrem APS (10 worków/opakowanie)

411108

Dowiedz się więcej pod bezpłatnym numerem:

800 120 093

www.convatec.pl www.cdiffficile.pl

Referencje:

1. Jones S, Towers V, Welsby S, et al. Clostridium difficile Containment Properties of a Fecal Management System: An In Vitro Investigation. Ostomy Wound Management 2011; 57(10):38-49. 2. Odor Barrier Testing. 130124-001. Data on file, ConvaTec Inc. 3. Flexi-Seal™ Privacy Bag Filter Evaluation. 121412-001. Data on file, ConvaTec Inc. 4. Minimizing the spread of C. difficile spores from the release of gas. February 19, 2013. Data on file, ConvaTec Inc.

ConvaTec Polska Sp. z o.o.

al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. (22) 579 66 50

Bezpłatna infolinia informacyjna: 800 120 093

www.convatec.pl, www.cdiffficile.pl

© - oznacza zastrzeżony znak towarowy ConvaTec Inc.

© 2018 ConvaTec Inc.



ConvaTec