

Poradnik dla użytkownika

Avelle™
Supermoc podciśnienia

Jedyny system łączący terapię podciśnieniową i technologię Hydrofiber™

1. Zakładanie opatrunku


Przygotowanie rany

- Za każdym razem upewnij się, że skóra otaczająca ranę jest sucha.
- Jeśli jest to konieczne, usuń nadmiar włosów z otaczającej skóry, aby zapewnić jej lepszy kontakt z przylepcami opatrunku i pasków mocujących.

Wybór opatrunku

Przy doborze opatrunku weź pod uwagę poniższe:

- Port powinien zostać umieszczony ponad nieuszkodzoną skórą.
- Upewnij się, że obszar rany jest nie większy niż 25% obszaru warstwy chłonnej i że zachodzi ona o 1 cm na skórę otaczającą ranę.
- Np. biorąc pod uwagę opatrunek wielkości 16x21cm, powierzchnia mogąca pokrywać ranę ma 6x7cm.

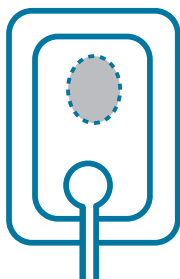

Jeśli używasz preparatu Sensi-Care Sting Free Skin Barrier, postępuj zgodnie z jego instrukcją użycia (IFU) i pozostaw skórę do całkowitego wyschnięcia.

- Wyjmij opatrunek ze sterylnej opakowania.
- Częściowo odchyl pasek zabezpieczający klej.



Przyłóż opatrunek, umieszczając port z dala od rany, nad nieuszkodzoną skórą. Upewnij się, że część opatrunku z portem położona jest powyżej rany oraz, że rana znajduje się centralnie pod dostępną pozostałą częścią warstwy kontaktowej.



Wygładź krawędzie opatrunku, przyciskając go do skóry, co zapobiegnie zagnieceniom.

Poprawienie położenia opatrunku, nie spowoduje utraty zdolności przylepnych, zapobiegnie natomiast powstawaniu zagnieć.



Staraj się unikać zagnieć i załamań opatrunku. Może to być źródłem potencjalnych nieszczelności.



Przyklej paski mocujące na wszystkie 4 brzegi opatrunku.

Usuń najpierw centralną część zabezpieczającą z nr 1. Zamocuj pasek a następnie usuń część zabezpieczającą z nr 2. Na końcu odklej wierzchnią warstwę nr 3.



Upewnij się, że zostawiłeś 1cm margines z każdej strony opatrunku.

- Uważaj, aby dren się nie zaplątał.

Paski mocujące są rekomendowane w celu zapewnienia szczelności opatrunku podczas noszenia.

2. Podłączenie pompy




Wyjmij pompę, dren i baterie z opakowania. Włóż 3 baterie AAA do otworu z tyłu pompy i zamknij wieczko.



Podłącz dren do pompy i opatrunku, dobrze skręcając razem łączniki. Opatrunek można podłączyć bezpośrednio do pompy, jeśli potrzebne jest krótsze połączenie.

3. Aplikacja Podciśnienia

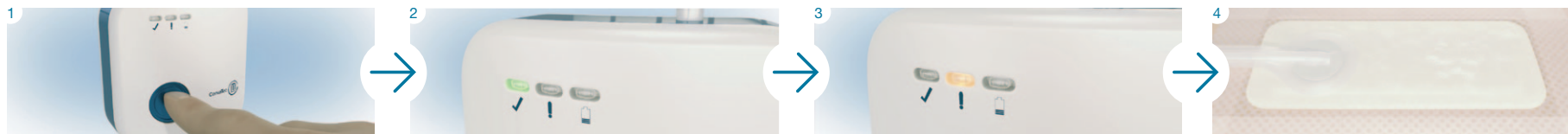

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy niebieski przycisk z przodu pompy, aby włączyć system. Zielony wskaźnik „✓” zacznie się świecić, co oznacza, że pompa działa. Pompa powinna ustabilizować podciśnienie w czasie do 30 sekund, kiedy może być słyszalna jej praca.

Żółta dioda zacznie migać, jeśli podciśnienie nie zostanie ustabilizowane lub kiedy zostanie wykryta nieszczelność. Sprawdź szczelność opatrunku i wygładź wszystkie nierówności. Sprawdź połączenia drenu.

Opatrunek spłaszczy się, kiedy podciśnienie zostanie osiągnięte.

4. Zmiana opatrunku

Opatrunek powinien być zmieniony zgodnie ze wskazaniami klinicznymi. Opatrunek powinien być również zmieniony, jeżeli występują oznaki nieszczelności, gromadzenie się wysięku wokół portu lub utrata przylepności.

- Maksymalny czas pozostawiania na ranie to 7 dni.
- Typowy czas pozostawiania na ranie to 3-4 dni.
- W zależności od poziomu wysięku lub innych wskazań klinicznych, może być niezbędna częstsza zmiana opatrunku.



Rozłącz w tym miejscu

- Wyłącz pompę, przyciskając i przytrzymując niebieski przycisk przez 3 sekundy i odłącz dren opatrunku od pompy przed zmianą opatrunku.

Ostrożnie rozciągnij paski mocujące, aby odkleić je od skóry, przed zdjęciem opatrunku.



Zmień opatrunek, zanim wysięk dojdzie do portu.

5. Wymiana pompy



- Pompa działa przez 30 dni od momentu rozpoczęcia terapii podciśnieniowej.
- W okresie 30 dni może być konieczna wymiana baterii.
- Żółta dioda nad znakiem baterii zacznie migać, kiedy moc baterii będzie na wyczerpaniu.



Po 30 dniach wszystkie diody przestaną się świecić.

Aby wymienić pompę, odłącz dren pompy od opatrunku odkręcając łączniki i podłącz nową pompę i nowy dren pompy.

6. Wypełniacz, warstwa kontaktowa i kompresja



W przypadku ran głębszych niż 2 cm, można użyć wypełniacza w postaci opatrunku AQUACEL® Extra™ lub AQUACEL®. Jeśli są niedostępne, można użyć standardowej gazy. Wypełniacz powinien być zmieniany jednocześnie ze zmianą opatrunku Avelle™.

System Avelle™ może być używany łącznie z terapią kompresyjną, jeśli zachodzi taka konieczność. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby dren był poprowadzony poza bandażami.

Warto wiedzieć

Łącznik opatrunku jest wyposażony w jednokierunkową zastawkę. Kiedy pompa jest odłączona, opatrunek Avelle™ będzie utrzymywał podciśnienie przez ok. 60 minut od momentu odłączenia pompy. *1

Używając Systemu można brać szybki prysznic. W tym celu, przed kąpielą, wyłącz pompę, odłącz dren pompy od opatrunku, tak jak to pokazano powyżej.

Ponownie podłącz opatrunek i włącz pompę aby kontynuować terapię, tak jak to pokazano powyżej.

Potrzebujesz więcej informacji?

Pełna instrukcja użytkowania systemu do podciśnieniowej terapii ran Avelle™, instrukcja obsługi pompy i przewodnik po rozwiązywaniu problemów znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.

Jeśli potrzebujesz wsparcia dotyczącego zakładania czy użytkowania systemu Avelle™, lub pomocy związanej z nieoczekiwanym alarmem lub innymi zdarzeniami dotyczącymi systemu, skontaktuj się z ConvaTec Polska Sp. z o.o.

Aby dowiedzieć się więcej na temat systemu Avelle™ lub umówić wizytę przedstawiciela, zadzwoń pod numer bezpłatnej infolinii 800-120-093 lub napisz maila na: dzial.pomocy@convatec.com

* jak wykazano *in vitro* 1. Airway Negative Pressure Luer Fitting Test. Doc number DOC-RN-115-ref-1. Data on file 2015

®/™ oznacza zastrzeżony znak towarowy ConvaTec Inc. ConvaTec Ltd jest autoryzowanym użytkownikiem.